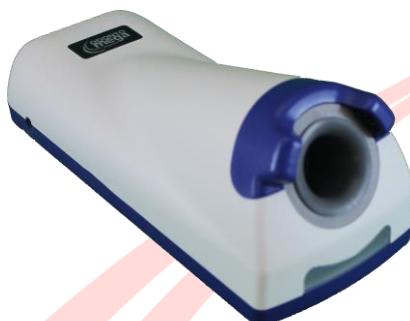


Manual de operação

MegaFlame

Código	Energia	AMP	Fusível	Temp	comprimento	profundidade	altura	peso
09-302	110v	100W	2A		91mm	209mm	89mm	0,53kg
09-302b	220v	100W	2A		91mm	209mm	89mm	0,53kg

Modo de uso

- 1- Ajuste o sensor de sensibilidade na lateral. Sensibilidade aumenta girando para

direita e diminui para a esquerda.



- 2- Use uma chave Philips para ajustar a sensibilidade.
- 3- Insira o instrumental no centro do buraco, para um melhor aquecimento.
- 4- Após ligar o produto, a luz verde deve estar acesa para uso correto. Em caso de luz vermelha sem que o sensor esteja ativado, veja a resolução de problemas.
- 5- O sensor no topo do equipamento detecta quando sua mão passa na frente. Quando o sensor é acionado, a luz que estava verde, fica vermelha, e o instrumento será aquecido instantaneamente.
- 6- Vem com capa protetora de borracha, mais um Refil. Protege o equipamento de que o instrumental com cera quente atinja o orifício de aquecimento

Precauções:

- 1- Não manje com as mãos úmidas ou molhadas.
- 2- Para um uso otimizado, não deixe luz solar ou lâmpada de calor interferir no sensor do produto.
- 3- Cuidado ao utilizar para não encostar o instrumental quente ou com cera no sensor. Isso atrapalha o bom funcionamento do MegaFlame.
- 4- Não desmonte o equipamento sem conhecimento técnico.
- 5- Não use o equipamento com o cabo de força danificado ou com uma tomada danificada.
- 6- Não dobre ou esmague o cabo de energia.
- 7- Não bloqueie a saída da ventilação na parte inferior do equipamento.
- 8- Desconecte da energia em caso de tempestade de raios ou quando não for usar por um longo período.
- 9- Não use o equipamento perto de torneiras, reservatórios de água, jatos de vapor, sprays de água ou perto de lugares com muita poeira.

Atenção: Não ponha o dedo dentro do equipamento em funcionamento, se estiver com um anel metálico. Evite queimaduras.

Não ponha o dedo dentro do equipamento, se eles estiver em uso durante muito tempo. Evite queimaduras.

Qualquer dúvida sobre uso, reparos ou outros assuntos contate imediatamente a OdontoMega.

Garantia OdontoMega

Garantia legal

Conforme determina o código de defesa do consumidor, este equipamento possui 90 (noventa) dias de garantia legal, a partir da emissão da nota fiscal para o consumidor.

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pela **OdontoMega** dentro do período de garantia legal.

Garantia estendida

A OdontoMega garante a seus clientes sempre produtos com altíssima qualidade, testados e em perfeitas condições, e com certificação europeia CE. Desde modo, também oferecemos extensão da garantia legal por mais 90 (noventa) dias.

Para usufruir da garantia estendida, as condições abaixo devem ser verificadas:

- 1- A garantia deverá cobrir os defeitos originados na fabricação, não incluindo desgaste natural de partes.
- 2- A garantia deverá cobrir o reparo e manutenção do produto, devolvendo em perfeitas condições de funcionamento, sem a obrigação de trocar o equipamento por completo.
- 3- Siga as instruções do manual. Danos gerados por mau uso, manutenção fora de local autorizado, problemas na corrente elétrica, não estão cobertos pela garantia.
- 4- Em caso de necessidade de manutenção, o transporte até a assistência técnica será pago pelo **Consumidor** dentro do período de garantia estendida.